

## 1. Schritt



## 2. Schritt



## 3. Schritt



### WICHTIG – Aktivieren Sie ihr Testkit

- Aktivieren Sie vor dem Probenversand Ihren Test mit Hilfe Ihres Proben-Codes. Ohne Aktivierung kann Ihre Probe nicht bearbeitet werden. Beginnen Sie mit der Probenabnahme erst, wenn die Aktivierung erfolgreich abgeschlossen wurde.

### Vorbereitungen

- Füllen Sie das Namensetikett aus und kleben sie es auf das Schutzröhrchen (nicht auf den Objektträger).
- Entnehmen Sie den Objektträger aus dem Schutzröhrchen.

### Probennahme

- Drücken Sie morgens (vor der Morgentoilette) einen transparenten Klebestreifen mit der Klebeseite kurz auf den Anus.

## 4. Schritt



### Verpacken

- Kleben Sie den Tesa-Streifen anschließend auf den Objektträger und stecken Sie diesen wieder in das Schutzröhrchen.
- Verschließen Sie das Röhrchen fest und legen Sie das Schutzröhrchen in die durchsichtige Schutztüte mit Saugeinlage.

**WICHTIG – Auf der Schutztüte befindet sich Ihr persönlicher Proben-Code, den wir zur Zuordnung Ihrer Probe benötigen.**

## 5. Schritt



### Versenden

- Legen Sie die Schutztüte in die graue Rückversandtasche und senden Sie diese an unser Labor zurück.

# Madenwurm (Oxyuren) Test

## Anleitung zur Probenentnahme

### Ihr Kit enthält:

- 1 Objektträger in Schutzröhrchen
- 1 durchsichtige Schutztüte
- 1 Rückumschlag
- 1 Namensetikett

### Hinweise:

- ❗ Für den Test benötigen Sie einen handelsüblichen Klebestreifen (z.B. Tesafilm).
- ❗ Der Klebestreifen muss transparent sein.
- ❗ Vermeiden Sie Kotreste. Diese behindern die Auswertung.

