

Sie haben Fragen oder benötigen Hilfe?

Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie auf [verisana.de/faq](https://www.verisana.de/faq)

Sie haben weitere Fragen?


Kontaktieren Sie uns jederzeit unter kontakt@verisana.de




ELISA Stuhltest

Anleitung zur Probenentnahme


Ihr Kit enthält:

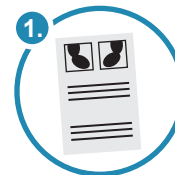

1 Stuhlfänger

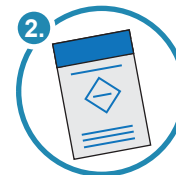

1 Schutztüte mit Saugeinlage

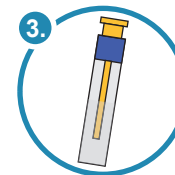

Probenröhrchen mit Pufferlösung



1 Rückumschlag



Hinweise:

- ! Bei Rücksendungen aus dem Ausland: Proben nur montags abnehmen und abschicken.
- ! Die Probe bis zum Versand kühl und lichtgeschützt lagern. Nicht einfrieren!
- ! Falsch abgenommene Proben können nicht analysiert werden. Für eine erneute Zusendung des Testkits berechnen wir Ihnen erneute Material- und Versandkosten.
- ! Bei Temperaturen unter 5 °C und über 30 °C Proben nicht in den Briefkasten werfen, sondern direkt bei der Post abgeben.


Achtung:

- ! Bitte beachten Sie, dass eine Medikamenteneinnahme (z. B. Antihistaminika) oder Alkoholkonsum das Testergebnis beeinflussen können.

1. Schritt



2. Schritt

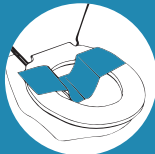


WICHTIG – Aktivieren Sie ihr Testkit

- Aktivieren Sie vor dem Probenversand Ihren Test mit Hilfe Ihres Proben-Codes. Ohne Aktivierung kann Ihre Probe nicht bearbeitet werden. Beginnen Sie mit der Probenabnahme erst, wenn die Aktivierung erfolgreich abgeschlossen wurde.

Stuhlfänger vorbereiten

- Benutzen Sie den Stuhlfänger, um zu vermeiden, dass der Stuhl mit dem Toilettenwasser in Berührung kommt.
- Vor dem Stuhlgang Blase entleeren, um Vermischung von Urin und Stuhl zu verhindern.

3. Schritt

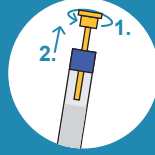

4. Schritt




Stuhlprobenröhrchen vorbereiten

- Das Stuhlprobenröhrchen am blauen Einsatz festhalten (der blaue Einsatz bleibt verschlossen auf dem Röhrchen).
- Dann den gelben Dosierstab aufdrehen und herausziehen. Flüssigkeit nicht ausschütten!

Probennahme

- Mit dem Dosierstab 3x an verschiedenen Stellen der Stuhlprobe einstechen. Alle Rillen der Dosierspitze müssen sich dabei mit Stuhl füllen.

5. Schritt

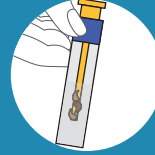

6. Schritt



Verpacken

- Den Dosierstab mit der Stuhlprobe **einmal** zurück in das Röhrchen stecken und **nicht wieder herausziehen**. Überflüssiger Stuhl wird dabei an der engen Öffnung des blauen Einsatzes abgestreift.
- Dann drehen Sie den Dosierstab so zu, dass der Klickverschluss hörbar einrastet.

Bitte beachten: Es darf nur die kleine definierte Stuhlmenge am Dosierstab in das Röhrchen gelangen.

Versenden

- Legen Sie das Stuhlprobenröhrchen in die durchsichtige Schutztüte mit Saugeinlage.
- WICHTIG – Auf der Schutztüte befindet sich Ihr persönlicher Proben-Code, den wir zur Zuordnung Ihrer Probe benötigen.**
- Legen Sie die Tüte in die graue Rückversandtasche und senden Sie diese an unser Labor zurück.